



Manual de uso

Cojín Conform





Productos suministrados

Cojín inflable CONFORM® con funda (revestimiento ignífugo - licra algodón o poliuretano), bomba manual y bolsa de transporte

Información del producto

Los cojines inflables CONFORM® son productos médicos de clase 1 (DE/CA/23/051603NA001.01).

Los cojines inflables CONFORM® están disponibles en 3 alturas diferentes (5, 7,5 y 10 cm) y una amplia gama de tamaños. Ofrecen la máxima comodidad de asiento, limitando el riesgo de úlceras de presión y se pueden utilizar terapéuticamente para problemas dérmicos ya existentes. Los cojines se pueden utilizar desde la etapa de profilaxis hasta con úlceras de presión (grado IV). Al elegir la altura de los cojines, se deben considerar aspectos como el peso de la persona, el estado, y la situación de la piel. Se puede utilizar el cojín A 1-válvula cuando lo que importa es aliviar la presión. Si además se requiere más estabilidad, se puede optar por cojines con 2 o incluso 4 válvulas. La decisión sobre el número de válvulas debe ser tomada por una persona cualificada.

No existen restricciones de uso ni en lo que respecta al material ni a la forma del cojín.

Las esquinas del cojín han sido diseñadas con ojales metálicos integrados para la sujeción del cojín con correas.

Para mantener la forma correcta de las celdas no se debe utilizar nunca el cojín sin la funda.

Los cojines inflables CONFORM® están fabricados con goma natural, un recurso renovable.

Debido a su elasticidad natural este producto no contiene ningún elemento suavizante.

No existen restricciones en cuanto al peso máximo del usuario. Recomendamos para pacientes de peso superior a 190 kg. el cojín de al menos 7,5 o 10 cm de altura.

Limpieza

Después de retirar la funda, se puede limpiar el cojín y desinfectarlo con un aerosol desinfectante o con un paño (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se pueden lavar a 60°C. Recomendamos un ciclo de lavado suave a 40º sin centrifugado después de cerrar las válvulas.

Para residencias y hospitales, existe un detergente especial llamado "Eltra 40 Plus", consulte el sitio del fabricante para obtenerlo (<https://de-de.ecolab.com>).

Garantía

Concedemos una garantía de 2 años a nuestros clientes por defecto de material o de fabricación.

Fabricante

Wolff Kunststoffe GmbH
Industriestraße 28
69509 Mörlenbach - Alemania

NIF: 007 248 13204

Nº de identificación a efectos de IVA: DE 144458680




Declaración CE

Los sistemas de cojines inflables CONFORM® cumplen todos los requisitos de productos médicos tal como se estipula en 93/42/EWG, fabricados en la CE

Cómo inflar el cojín

	Inflar el cojín CONFORM® con la bomba que se adjunta hasta que empiece a arquearse. Sujetar el tubo de la bomba a la válvula del cojín. Abrir la válvula girándola hacia la izquierda e inflar el cojín. Cerrar la válvula girándola hacia la derecha. Si fuera necesario, la persona también puede estar sentada sobre el cojín mientras se infla.
	Sentar al paciente y desinflar el cojín. El paciente se hunde cómodamente pero no hay que dejar que las nalgas del paciente toquen la base del cojín. La distancia entre la persona sentada (por lo general el coxis o tuberosidades isquiáticas) y la base del cojín debe ser de aproximadamente 3/4 de pulgada o 1,5 - 2 cm.

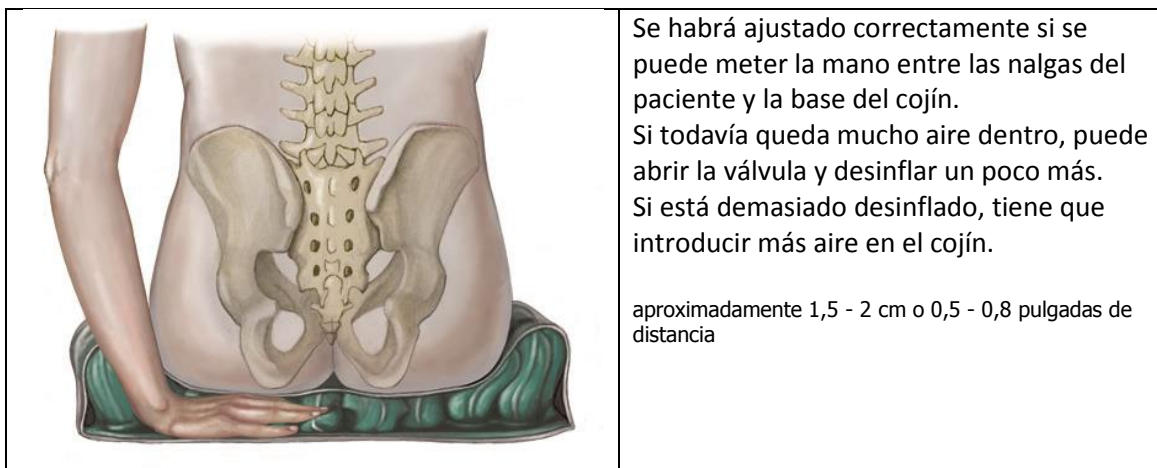

Instrucciones de seguridad

Uso - No utilizar nunca el cojín sin la funda. Debido a la estructura del cojín, la funda es necesaria para mantener la forma del cojín.

Cojín del asiento - Lado superior y placa inferior - Cuando se coloque el cojín en la silla de ruedas, comprobar que la placa plana del fondo se encuentre sobre la superficie de asiento de la silla de ruedas. El usuario se sienta sobre el lado superior (celdas)

Control, si hay aire dentro del cojín - Una vez al día se debe revisar el cojín si tiene aire dentro. Hay que volverlo a inflar cada 8 - 21 días.

Procedimiento de inflado del cojín - Inflar el cojín con la bomba que se adjunta en el paquete. Las bombas eléctricas pueden producir mucha presión interior y hacerlo explotar. Abrir la válvula con la mano y no con tenazas. Si se utiliza una herramienta la válvula puede estropearse, curvarse o atascarse.

Almacenaje - El producto está fabricado con goma natural y no debe exponerse a la luz solar (rayos UV) que podría provocar un envejecimiento prematuro del material. Si no se utiliza el cojín, recomendamos guardarlo dentro de su caja.

Limpieza - Después de quitar la funda, el cojín se puede limpiar utilizando un spray o un pañuelo desinfectante común (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se pueden lavar a 60 °C usando un detergente de higiene. Recomendamos un ciclo suave de lavado a máquina a 40 °C sin centrifugado después de cerrar las válvulas del cojín. Para hogares de ancianos y hospitales, hay un detergente especial disponible "Eltra 40 Plus", consulte al fabricante (<https://de-de.ecolab.com>).

Productos líquidos de limpieza - El producto empleado no debe contener aceite de silicona. Recomendamos el detergente en polvo Eltra 40 Extra.

Líquido para conservar el cojín - No necesario

Fuego lento y cenizas calientes - La funda del cojín es ignífuga. En caso de contacto con brasas, podría dañarse.

Traspaso del cojín a otra persona - En caso de que el cojín vaya a ser utilizado por otra persona, el cojín y la funda tienen que ser desinfectados y lavados, aunque no haya suciedad aparente. Recomendamos comprar una funda nueva.

Adaptación óptima al asiento - La anchura y profundidad del cojín deben estar adaptadas a la silla de ruedas. Un cojín demasiado grande puede sufrir fugas. Si el cojín es demasiado pequeño no ofrecerá un alivio de presión óptimo al paciente.

Pérdida de aire - En caso de pérdida de aire, el cojín debe ser inflado de nuevo para comprobar la válvula. Si la válvula está correctamente cerrada, contacte con el especialista en atención sanitaria o con su proveedor de productos médicos.

Agujero en el cojín - Si hubiera un agujero en el cojín, contacte con su especialista en atención sanitaria o proveedor de productos médicos.

Mascotas - Si hay mascotas en su entorno, tenga en cuenta que podrían estropear el cojín.