

Instrucciones de uso y normas de seguridad para camillas y sillones HIDRAULICOS

INSTRUCCIONES GENERALES

Es imprescindible leer y aplicar las instrucciones de uso y seguridad.

Se recomienda familiarizarse con el uso correcto de la camilla antes de empezar a utilizarla.

El uso de la camilla puede resultar peligroso si recibe una manipulación inadecuada o distinta de la propia por parte de personal no cualificado. Tenga precaución ya que existe riesgo de quedar atrapado entre partes móviles y por movimientos inesperados.

Revise regularmente la camilla en su totalidad por si existe cualquier indicio de avería o desperfecto.

Las piezas defectuosas o desgastadas por el uso deben reponerse inmediatamente utilizándose única y exclusivamente las piezas originales de repuesto del fabricante.

AVISO: En caso de utilizar piezas no originales o alterar la estructura de la camilla la garantía quedará anulada. En este supuesto tanto las instrucciones del fabricante como el certificado de conformidad pierden validez

INSTRUCCIONES DE USO

A) Estabilidad de la camilla:

La camilla debe descansar sobre un suelo resistente y a nivel.

No se debe apoyar con todo el peso en un extremo de la camilla para evitar que bascule.

B) Regulación de la altura:

Hidráulico de 2 pedales, uno a cada lado de la camilla

Presione el pedal con el pie de forma intermitente hasta conseguir la altura deseada, para bajar hay que poner el pie debajo del pedal, presionar hacia arriba y la camilla descenderá.

C) REGULACION DE LOS DISTINTOS CUERPOS TAPIZADOS

1) Regulación mediante RESORTES DE GAS

Utilice ambas manos para cambiar el posicionamiento del cuerpo que desee, con una mano accione la palanca hacia arriba y a su vez con la otra mano súbalo o bájelo hasta la posición deseada, accione la palanca hacia abajo y quedará fijado.

2) Regulación Brazos, porta sueros, perneras.

Afloje el mango de sujeción y suba o baje hasta la posición deseada, apriételo y quedará fijo.

3) Regulación barandillas:

Se suben y quedan aseguradas de forma automática, para plegarlas hay que desbloquear el seguro tirando del pomo

F) Manera de subir a la camilla:

Para subir a la camilla, haga que el paciente se acomode en la parte central y se siente o tumbé. **ES MUY IMPORTANTE REPARTIR EL PESO*** Atención: El paciente no debe apoyarse en el cabezal o respaldo para darse impulso pues no está concebido para soportar tal presión.

G) Desplazamiento de la camilla.

Para mover la camilla provista de RUEDAS ESCAMOTEABLES (R-3 y R-4), hay que liberarlas bajando la palanca situada junto a ellas en la base y una vez en el sitio, volver a dejarla fija levantándola. ESTAS RUEDAS SON SOLO PARA DESPLAZAR LA CAMILLA, NO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS.

Para mover la camilla provista de RUEDAS GRANDES CON FRENO INCORPORADO (R-1 y R-6) cada rueda en la parte delantera superior lleva incorporada una lengüeta la cual accionándola hacia arriba queda liberada y puede rodar, accionada hacia abajo queda frenada y al estar así las cuatro, la camilla queda inmovilizada. ESTAS RUEDAS SI SON APROPIADAS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

A) Estructura metálica:

Para conseguir un buen funcionamiento de la camilla, es aconsejable retirar habitualmente el polvo limpiándola con un paño. Las partes móviles deben engrasarse regularmente con grasa líquida en spray aplicada sobre los puntos de articulación. Para ello debe colocar de lado la camilla, quitar los tapones protectores de las tuercas, aflojarlas un poco si es posible y aplicar el aceite. Después de pasar unas horas, proceder de manera inversa y hacer lo mismo en las zonas con un alto grado de humedad.

B) Hidráulico:

Procure mantener el hidráulico libre de polvo y grasa. Debe tener la precaución de evitar derramar líquidos sobre **EL HIDRÁULICO NO DEBE MANIPULARSE BAJO NINGÚN CONCEPTO YA QUE EN ESTE CASO PERDERÍA LA GARANTÍA.** Si se produce una avería contacten con su distribuidor.

C) Tapicería:

Se recomienda quitar el polvo con un trapo húmedo, cuando no sea suficiente, limpie con agua, jabón neutro y una esponja suave, seque completamente con un trapo. Evite mojar con mucha cantidad de agua para que no penetre por las costuras

Para una mejor protección frente a sudor, cremas o aceites de masaje, se recomienda el uso de una sábana protectora.

En el caso de manchas hay que tratarlas inmediatamente con agua jabonosa. **NO UTILICE ALCOHOL Y EVITE TODOS LOS DISOLVENTES, QUITAMANCHAS y CUALQUIER PRODUCTO ABRASIVO**, ya que estropean el tapizado.

El uso de lámparas de infrarrojos puede cuartear la polipiel. Para evitarlo, cubra con una manta de algodón, toalla o similar.

NORMAS DE SEGURIDAD:

El uso de la camilla puede resultar peligroso si recibe una manipulación inadecuada o distinta de la propia por parte de personal no cualificado.

Antes de colocar al paciente en la camilla, SI LLEVA RUEDAS asegúrese de que:

SI SON CON FRENO ESTEN LAS CUATRO FRENADAS.

SI SON ESCAMOTEABLES QUE NO ESTEN EN CONTACTO CON EL SUELO.

Tenga precaución ya que existe riesgo de que alguna parte del cuerpo quede atrapada entre los elementos en movimiento al regular la altura de la camilla

Para subir a la camilla, haga que el paciente se acomode en el centro y se siente o tumbe. ES MUY IMPORTANTE REPARTIR EL PESO.

Nunca ajuste ningún cuerpo tapizado de la camilla si es por medio de palancas, bisagras o resortes de gas cuando el paciente esté apoyado sobre ella con todo su peso.

Al subir o bajar el respaldo asegúrese de que el paciente ni el terapeuta queden atrapados

El paciente no debe apoyarse en el cabezal o respaldo para darse impulso pues no está concebido para soportar tal presión.

No se debe apoyar con todo el peso en un extremo de la camilla para evitar que bascule.

FABRICADO POR CasSalud Coop. V

Polig ind Europa II c/ Villafamés s/n nave 27- 12550 Almazora- Castellón