

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmunte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección o cambie la funda por una nueva.

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

Importado por:

Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



AyudasDinámicas

MANUAL DE USUARIO

COJÍN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA CON FORMA ANATÓMICA VISCO FORM



Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cojín de espuma viscoelástica con forma anatómica y descarga para el cóccix. Funda de poliuretano (PU) impermeable y transpirable con base antideslizante.

USO PREVISTO

Ayuda para la prevención y el tratamiento de las escaras.

Indicaciones de uso

La forma anatómica del cojín necesita, para un buen posicionamiento sobre la silla :

- El tamaño del cojín ha de ser compatible con el tamaño de la silla.
- Es preferible no utilizar el cojín sobre una superficie exageradamente inclinada.
- Respetar bien los sentidos delante-detrás y arriba-abajo del cojín.

A fin de que el dispositivo conserve toda su eficacia, verifique que su peso esté comprendido entre los valores indicados en cada una de las tallas.

Contraindicaciones

Escaras presentes en la zona de apoyo (salvo recomendación médica).

ESPECIFICACIONES



PRECAUCIONES DE USO

-No interponer cuerpos extraños entre el paciente y el dispositivo, aparte la ropa.

-Se recomienda adquirir una funda de protección de recambio:

En uso mono-paciente y multi-paciente: para su utilización durante los lavados de la primera funda, a fin de evitar el contacto directo con la superficie del dispositivo.

En uso multi-paciente: al cambiar de paciente (el dispositivo debe ser lavado y descontaminado, como mínimo, con cada cambio de paciente).

-No se aconseja utilizar el dispositivo para otra parte del cuerpo que la prevista en su origen.

-Si constata un deterioro del producto (hundimiento de la espuma) o un efecto de punzonamiento, contacte con su distribuidor, a fin de que éste pueda ayudarle en la reparación o la renovación de su equipo.

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA FUNDA

Limpieza: Limpieza de superficie con una toallita / esponja ligeramente impregnada con agua jabonosa y enjuagar con una toallita / esponja ligeramente humedecida con agua limpia.

Desinfección: Desinfección de la superficie con una toallita / esponja ligeramente impregnada con detergente desinfectante de superficie con un pH neutro, adaptado a los dispositivos médicos (respetando el modo operatorio recomendado por el fabricante del producto utilizado). Proceder a un enjuagado final con una toallita / esponja ligeramente humedecida con agua limpia. Secar bien. No utilizar productos corrosivos ni un material abrasivo. Lavado en lavadora (al menos cada 20 pulverizaciones con un detergente-desinfectante, a fin de eliminar cualquier residuo y liberar los poros de la funda).

Posibilidad de lavado a máquina hasta 40°C. Concentración máxima de cloro autorizada <1.000 ppm (en este caso, imprescindible aclarado con agua limpia). Dejar secar al aire NO utilizar secadora. No limpiar a seco. No utilizar ni productos corrosivos, ni material abrasivo.

Precauciones a seguir:

- Dejar secar siempre la funda antes de volver a ponerla en el dispositivo (riesgo de mohos en caso de enfundar en dispositivo con una funda húmeda o mal secada).
- Controlar regularmente (en cada mantenimiento) el estado de la funda respecto a los desgarros, perforaciones y signos de abrasión, y dejar de utilizar el dispositivo si la funda presenta un defecto de integridad.
- Utilizar una funda de recambio idéntico si se utiliza el dispositivo durante el procedimiento de limpieza a máquina de la funda.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DISPOSITIVO

No se puede lavar la espuma viscoelástica. La funda impermeable evita que cualquier líquido pueda entrar en contacto con la espuma del cojín.