

TABURETE REDONDO PORTOFINO (Ref. AD540L)

MODO DE EMPLEO:

El taburete redondo Portofino permite una mayor independencia durante las etapas de ducha en la higiene personal diaria, reduciendo la fatiga por estar de pie, así como los riesgos a resbalarse y lesionarse. Las conteras de goma antideslizantes garantizan el agarre con el suelo, y las patas regulables permiten al usuario cambiar fácilmente la altura total de acuerdo a sus necesidades. Además, el taburete de ducha con la altura personalizada se puede utilizar con diferentes longitudes de ajuste entre las patas delanteras y traseras. En particular, las patas delanteras pueden ser más bajas que las traseras:

Esto permite al usuario mantener posturas más correctas mientras toma una ducha, así como para facilitar los procedimientos de sentarse. Debido a su flexibilidad, se pueden colocar incluso en suelos con desnivel e irregulares, como los de muchos platos de ducha. El taburete se puede mover fácilmente debido a su peso ligero.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

El taburete redondo Portofino está dirigido a personas mayores, personas con movilidad reducida de lumbar, rodilla o cadera, y a todos aquellos que tienen dificultades para mantenerse en pie durante las etapas de ducha y de la higiene personal diaria.

El usuario debe tener autonomía del equilibrio durante los procedimientos de sesión y de pie, así como para tener la capacidad adecuada para mantenerse sentado. El taburete no debe ser utilizado si el usuario tiene problemas relacionados con el equilibrio o trastornos de la percepción.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INDICACIONES:

- No se debe exceder el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el taburete de ducha esté correctamente montado y en una posición estable.
- El taburete de ducha solo se pueden utilizar en superficies libres de obstáculos.
- Durante el montaje, adhiera exactamente lo que se muestra en el Manual del usuario.
- El riesgo de lesiones en los dedos puede aumentar durante el proceso de montaje.
- No balancee el taburete, puede provocar que resbale, vuelque o la rotura de las patas. Mantenga siempre el taburete de la ducha en sus 4 patas.
- No modifique el taburete ni sus componentes de ninguna manera.
- No utilice el taburete si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar de manera importante en la seguridad del mismo, siga correctamente lo que se muestra en el Manual del usuario.
- Después de su uso, el taburete de ducha debe retirarse de la zona de ducha para evitar cualquier obstrucción.
- No utilice el taburete de ducha para un propósito distinto a los especificados.
- EL taburete no debe guardarse al aire libre.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento de los productos consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Con el fin de garantizar un uso seguro y una buena higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso.

El usuario tiene que asegurarse de la integridad estructural del dispositivo y sus componentes.

Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:

1. Se deben usar guantes.
2. Retire la suciedad evidente antes de proceder con la desinfección más precisa.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpie con un paño seco y limpio.

Alternativamente, el producto se puede limpiar en lavavajillas domésticos a la temperatura máxima.

REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es adecuado para su reutilización por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otros, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente, siempre antes de la transferencia del producto a otros, el producto debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN CORRECTO:

No deseche el producto en los residuos domésticos normales. Tenga siempre en cuenta el reciclaje para cuidar el medioambiente.

INFORMES DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.



TABURETE REDONDO PORTOFINO (Ref. AD540L)

